

## PARTE DELANTERA

REF. 2609\_Mascarilla Higiénica Reutilizable Adulto

**ADVERTENCIA:** Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42/CEE o del Reglamento (UE) 2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento (UE) 2016/425.

This device is not a medical device in the sense of Regulation (EU) 2017/745 nor is it personal protective equipment in the sense of Regulation (EU) 2016/425.

Instrucciones de colocación:  
Use instructions:



Uso personal y reutilizable. Talla S.  
Personal and reusable use. Size S.

Especificación UNE 0065:2020

Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños. Requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso.

Reusable hygienic masks for adult and children. Materials, design, manufacturing, marking and use requirements.

Composición:

Exterior: 50% algodón 50% poliéster. Interior: 100% algodón. Tejido con tratamiento antiviral y antibacteriano.

Outer: 50% cotton 50% polyester. Inner: 100% cotton. Fabric with antiviral and antibacterial treatment.

Respirabilidad (Pa/ cm<sup>2</sup>) < 60. BFE (Eficiencia de Filtración Bacteriana) ≥ 90%

Breathability (Pa/ cm<sup>2</sup>) < 60. BFE (Bacterial Filtration Efficiency) ≥ 90%

Certificado por AITEX, N° Ensayo 2020TM1692.

Certified by AITEX, Test report 2020TM1692

## PARTE TRASERA



Con agua y jabón en circuito abierto.  
With soap and continuous running water.

< 25 lavados / washing cycles



No tocar con las manos  
No touch with the hands.

Retirada / Removing:



**Importante:** Después de cada lavado, compruebe la integridad del producto antes de volver a usar. Deséchelo si encuentra algún desperfecto. Evitar el contacto entre una mascarilla sucia y prendas limpias. Secar completamente dentro de las 2 h posteriores al lavado. En el secado y el almacenaje, evitar ambientes en los que la mascarilla se pueda volver a contaminar.

Las mascarillas se deben desechar en un contenedor provisto de una bolsa de plástico.

No reutilizar una mascarilla sucia o húmeda. No usar durante más de 4 horas.

**Important:** After every wash, check that the product is not damaged before reusing. Discard if any imperfections are found. Any contact between a dirty barrier mask and clean items should be avoided. Complete drying of the barrier mask is recommended within under two hours after washing is finished. During the drying and storage, avoid environments where the mask can be contaminated again. The barrier masks must be disposed of in a bin fitted with a plastic bag. Do not reuse any dirty or wet barrier mask. Single 4-hour period use.



Mkto Catal Importaciones S.L.  
B04267225

Ctra. Huércal-Overa, S/N 04640  
Pulpi, Almería, España